

rok zał. 1949

TECH - MED®

TECHNIKA MEDYCZNA

ISO 9001 ISO 13485



MODEL: TM-301



WAGA OSOBOWA

waga osobowa

WAGA OSOBOWA

CYFROWA WAGA ŁAZIENKOWA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zachować niniejszą broszurę do późniejszego wykorzystania.

ELEKTRONICZNA WAGA ŁAZIENKOWA

DANE TECHNICZNE:

Wyposażona w czujnik tensometryczny o dużej precyzji.

Maksymalne obciążenie: ponad 150 kg / 330 lb / 24 st,

Skala: 100 g / 0,2 lb

Funkcja włączania przez naciśnięcie stopą

Automatyczne zerowanie

Funkcje pamięci do 5 użytkowników

Niebieskie podświetlenie wyświetlacza

Funkcja automatycznego wyłączenia

Wskaźnik przeciążenia

ZASILANIE:

Urządzenie zasilane jest dwoma bateriami litowymi o napięciu 3 voltów.

DZIAŁANIE:

1. Umieścić wagę na twardej, płaskiej powierzchni (unikać dywanów i śliskich powierzchni).
2. Włączyć wagę, delikatnie naciskając stopą na płytę.
3. Odczekać kilka sekund na wyzerowanie się wagi. Po tym czasie urządzenie jest gotowe do użycia.
4. Spokojnie wejść na wagę, ustawić stopy równo na płycie i odczekać chwilę nieruchomo na wykonanie pomiaru. Wynik pomiaru pojawi się na wyświetlaczu LCD.

5. Można zmienić jednostkę pomiaru (kg, lb lub st), otwierając komorę na baterie na odwrocie wagi i ustawiając przełącznik w odpowiedniej pozycji.

FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA:

Po zejściu z wagi urządzenie automatycznie wyłączy się po ok. 8-10 sekundach.

WSKAŹNIK PRZECIĄŻENIA:

W przypadku przeciążenia wagi (ponad 150 kg / 330 lb / 24 st, 180 kg / 396 lb / 28 st lub 200 kg / 440 lb / 31 st) na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie („Err”).

WSKAZÓWKI DOT. BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA:

1. Wagę należy zawsze umieszczać na twardej, płaskiej powierzchni. Zapewni to dokładne zrównoważenie obciążenia.
2. Należy zawsze upewnić się, że waga nie stoi na śliskiej powierzchni.
3. Nierówna podłoga może wpłynąć na wynik pomiaru.
4. Należy ważyć się bez ubrania i butów przed posiłkiem. Dobrze jest przeprowadzać ważenie rano jako pierwszą czynność dnia.
5. Waga zaokrągla w górę lub w dół z dokładnością do 100g.
6. Waga powinna być czyszczona za pomocą wilgotnej szmatki. Nie należy zanurzać jej w wodzie ani używać chemicznych środków czyszczących.
7. Dbać, aby do wnętrza wagi nie dostała się woda, ponieważ może to uszkodzić części elektroniczne.
8. Waga nie powinna być przechowywana w pozycji pionowej, ponieważ prowadzi to do wyczerpania baterii.
9. Jeśli waga nie jest używana przez dłuższy czas, należy wyjąć z niej baterie.
10. Waga jest urządzeniem precyzyjnym, dlatego należy obchodzić się z nią ostrożnie. Nie należy narażać jej na upadki ani skakać na niej.

Model

.....
Nr seryjny

.....
Data sprzedaży

.....
Pieczęć punktu sprzedaży

.....
Opis usterki

Model

.....
Nr seryjny

.....
Data sprzedaży

.....
Pieczęć punktu sprzedaży

.....
Opis usterki

Model

.....
Nr seryjny

.....
Data sprzedaży

.....
Pieczęć punktu sprzedaży

.....
Opis usterki

Model

.....
Nr seryjny

.....
Data sprzedaży

.....
Pieczęć punktu sprzedaży

.....
Opis usterki

rok zał. 1949

TECH - MED®

TECHNIKA MEDYCZNA

B. WÓJCIK s-ka jawna

02-735 Warszawa, ul. Studencka 49

Tel. (022) 853 30 10,

e-mail: techmed@techmed.pl

www.techmed.pl

S k l e p f i r m o w y

00-801 Warszawa, ul. Chmielna 98

Tel. (022) 654 64 92, Fax (022) 620 77 42

Przed użyciem wagi prosimy przeczytać instrukcję.

Życzymy Państwu dużo zdrowia