

rok zał. 1949

TECH - MED®

TECHNIKA MEDYCZNA

ISO
9001

ISO
13485

CE

IUŻ 60 LAT
POMAGAMY ZDROWO ŻYĆ



- FUNKCJA UTRZYMYWANIA TEMPERATURY
- FUNKCJA MASAŻU BĄBELKOWEGO
- FUNKCJA MASAŻU WIBRACYJNEGO
- FUNKCJA PROMIENIOWANIA PODCZERWONEGO

Instrukcja obsługi

APARAT DO MASAŻU STÓP

MODEL: TM-588

APARAT DO MASAŻU STÓP

TECH - MED

TM-588

INSTRUKCJA OBSŁUGI

I. WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup aparatu do masażu stóp TM-588. Właściwe wykorzystanie urządzenia może poprawić krążenie krwi w skórze stóp, co objawia się przyjemnym i trwałym wrażeniem ciepła (wzrostu temperatury skóry). Regularne wykonywanie hydromasażu może poprawić krążenie krwi nie tylko w stopach, ale pośrednio również w całych nogach. Grzałki z regulacją temperatury, umieszczone pod obiema podpórkami dla stóp, po właściwym ustawieniu przełącznika obrotowego zapewniają odpowiednią temperaturę w czasie całego masażu wodnego. Punkty stymulacyjne działają niczym delikatne palce, które dotykają podeszew stóp i gwarantują wyjątkowo efektywny i pobudzający masaż. Można łatwo zmieniać intensywność masażu poprzez lekkie zwiększenie lub zmniejszenie nacisku stóp. Dysze powietrzne zapewniają stopom relaksacyjną kąpiel z bąbelkami oraz masaż wibrujący. **PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA** Używanie urządzeń elektrycznych, zwłaszcza w obecności dzieci, musi zawsze wiązać się z przestrzeganiem podstawowych zasad bezpieczeństwa.

II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Należy się upewnić, że wartość napięcia na tabliczce znamionowej jest taka sama jak napięcie w sieci, do której urządzenie będzie podłączone.
2. Urządzenie powinno być używane wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach. Nigdy nie należy używać urządzenia poza budynkiem. Urządzenie powinno być umieszczone na czystej i płaskiej powierzchni.
3. Urządzenie nie powinno być używane w łazience, w pobliżu prysznicznicy lub basenu, ani w pobliżu innych otwartych zbiorników wodnych.
4. Nie należy wkładać ani wyjmować wtyczki z gniazdka, gdy stopy są zanurzone w wodzie.

5. Przed włożeniem lub wyjęciem wtyczki z gniazdka należy się upewnić, że przełącznik obrotowy znajduje się w pozycji „0”.
6. NIGDY nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie lub innym płynie w celu umycia urządzenia ani z innych powodów.
7. Nie należy stać w urządzeniu. Należy korzystać z niego wyłącznie w pozycji siedzącej.
8. Nie należy włączać urządzenia, jeżeli nie ma się zamiaru z niego korzystać.
9. Nie powinno się używać urządzenia w czasie snu lub w przypadku odczuwania uczucia senności.
10. Przerwij korzystanie z urządzenia, jeżeli poczujesz się źle lub jeżeli wystąpi jakikolwiek ból czy podrażnienie. Nigdy nie używaj urządzenia, jeżeli Twoje stopy są opuchnięte, ani w przypadku występowania stanów zapalnych albo wysypki skórnej. Przed użyciem urządzenia skonsultuj się z lekarzem.
11. Urządzenie zawiera powierzchnię, która w trakcie działania urządzenia może stać się gorąca. Osoby niewrażliwe na wysokie temperatury powinny zachować ostrożność podczas korzystania z urządzenia.
12. Urządzenie nie powinno być używane bez pomocy lub nadzoru osoby dorosłej przez dzieci oraz inne osoby, których możliwości fizyczne, czuciowe lub umysłowe uniemożliwiają korzystanie z urządzenia w bezpieczny sposób. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Nie wolno zostawiać dzieci samych w pobliżu urządzenia.
13. Nie należy ciągnąć urządzenia za przewód. Przewód nie powinien być używany jako rączka.
14. Jeśli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę dysponującą podobnymi kwalifikacjami, by uniknąć możliwych zagrożeń. Urządzenie nie zawiera żadnych części, które wymagają konserwacji przez użytkownika. W wypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia należy odłączyć je od sieci i skontaktować się z producentem, jego przedstawicielem serwisowym lub osobą dysponującą podobnymi kwalifikacjami.
15. Zawsze należy sprawdzić, czy przewód zasilający nie znalazł się pod urządzeniem.

16. Urządzenie można podłączać do gniazdka prądu przemiennego (zwykła sieć dostępna w gospodarstwie domowym). Nie należy korzystać z innych gniazd.

III. UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA

Urządzenie służy wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym. Jego wykorzystanie do celów komercyjnych jest niedozwolone. Urządzenie służy do zabiegów pielęgnacyjnych. Nie powinien być używany jako miednica. Przed skorzystaniem z urządzenia należy oczyścić stopy. Urządzenie należy czyścić po każdorazowym użyciu. Osadzanie brudu może zatkać dysze powietrzne i zmniejszyć działanie efektu bąbelkowania.

CZYSZCZENIE: Po użyciu urządzenia odłącz go od sieci i opłucz go wodą. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie. Można dodatkowo przetrzeć wszystkie powierzchnie ściereczką zmoconą w wodzie z łagodnym detergentem, a następnie opłukać i wysuszyć je. Nie należy używać środków czyszczących ostrych, łatwopalnych ani przeznaczonych do szorowania. Może to doprowadzić do zniszczenia powierzchni urządzenia lub izolacji elektrycznej.

IV. INFORMACJE HIGIENICZNE

Po każdorazowym użyciu należy oczyścić urządzenie i wszystkie akcesoria. Do czyszczenia nie należy używać alkoholu, acetonu, benzyny ani środków do szorowania. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów, należy co pewien czas użyć łagodnego środka dezynfekującego (dostępnego w sklepach) i dokładnie oczyścić wszystkie części urządzenia. Urządzenie i poszczególne akcesoria należy przechowywać w pudełku.

PRZECHOWYWANIE: Najpierw upewnij się, że urządzenie jest odłączone, chłodne i opróżnione z wody. Owiń przewód zasilający wokół uchwytu na spodzie urządzenia. Następnie umieść je w czystym i suchym miejscu. Nigdy nie wieszaj urządzenia na przewodzie zasilającym. Nie podłączaj urządzenia do sieci, jeśli przewód zasilający jest częściowo zawiąnięty na uchwycie.

V. JAK UŻYWAĆ APARATU DO MASAŻU STÓP

Urządzenie musi zawsze działać z wodą.


Przed podłączeniem urządzenia do sieci upewnij się, że przełącznik obrotowy znajduje się w pozycji „0”.

Nie podłączaj urządzenia do sieci i nie odłączaj go od sieci, jeśli Twoje stopy znajdują się w wodzie lub jeśli masz mokre ręce.

Umieść urządzenie na płaskiej, odpowiedniej powierzchni. Antypoślizgowe gumowe nóżki zabezpieczają urządzenie przed przemieszczaniem się.

Napełnij urządzenie ciepłą lub zimną wodą o właściwej temperaturze powyżej oznaczenia „MIN” widocznego na obudowie. Urządzenie umożliwia podtrzymanie temperatury wody na odpowiednim poziomie.

Usiądź wygodnie, umieść stopy na podpórkach i wybierz odpowiednie ustawienia: masażu bąbelkowego, utrzymania temperatury wody i podczerwieni oraz masażu z podczerwienią.

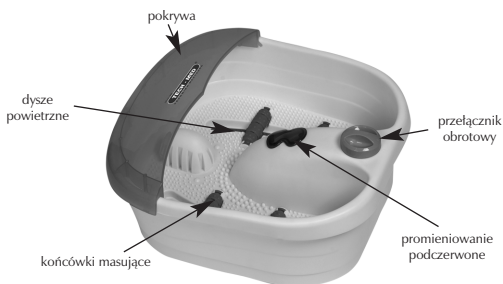

Dostępne są następujące funkcje:

(1) MASAŻ WIBRUJĄCY + PODCZERWIEN

Ustaw przełącznik obrotowy w pozycji 1.

Dzięki tej funkcji uzyskasz wyjątkowy masaż wibracyjny i relaksującą kąpiel stóp w ciepłej wodzie z podczerwienią. Światło podczerwone może mieć pobudzający wpływ na krążenie krwi.

(2) MASAŻ BĄBELKOWY + PODCZERWIĘŃ + UTRZYMANIE TEMPERATURY WODY

Ustaw przełącznik obrotowy w pozycji 2.

Dzięki tej funkcji uzyskasz relaksującą kąpiel stóp w ciepłej wodzie, wraz ze stymulującą kąpielą bąbelkową i podcierwienią.

(3) MASAŻ BĄBELKOWY + MASAŻ WIBRUJĄCY + PODCZERWIĘŃ + UTRZYMANIE TEMPERATURY WODY

Ustaw przełącznik obrotowy w pozycji 3.

Dzięki tej funkcji uzyskasz wyjątkowy masaż wibracyjny, bąbelkowy oraz podcierwień z funkcją utrzymywania temperatury wody.

Po zakończeniu korzystania z aparatu do masażu stóp nie zapomnij o ustawieniu przełącznika obrotowego w pozycji „0”. Następnie wyjmij stopy z urządzenia i odłącz je od sieci. **NIE KORZYSTAJ Z URZĄDZENIA W POZYCJI STOJĄCEJ!**

Aby opróżnić urządzenie z wody, przechyl je do przodu nad umywalką lub wanną, by woda mogła wypłynąć przez kanał odpływowy znajdujący się z przodu aparatu pod pokrywą. Oplucz i wysusz urządzenie. Nigdy nie zanurzaj całego urządzenia w wodzie ani w innych cieczach.

UTYLIZACJA UŻYWANEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO



Ten symbol na produkcie, jego częściach lub opakowaniu oznacza, że nie powinien on być traktowany tak, jak inne odpady powstające w gospodarstwie domowym. Do jego utylizacji przeznaczone są odpowiednie punkty odbioru zajmujące się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja produktu zapobiega potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, jakie mogłoby przynieść niewłaściwe postępowanie z odpadami w przypadku tego produktu. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu naszych zasobów naturalnych. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z naszym biurem w Warszawie lub ze służbami oczyszczania miasta.

VI. GWARANCJA

Urządzenie objęte jest roczną gwarancją wyłącznie z załączonym dowodem zakupu. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady produkcyjne. Gwarancja nie obejmuje skutków wypadku, nieprawidłowego użycia, zaniedbania lub użycia produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Należy stosować wyłącznie załączone do produktu akcesoria. Zastosowanie jakichkolwiek innych akcesoriów niż zatwierdzone może wiązać się z utratą gwarancji. Nie należy otwierać urządzenia. W przypadku stwierdzenia otwarcia lub ingerencji w obudowę urządzenia, gwarancja automatycznie traci ważność. Gwarancja nie obejmuje części podatnych na zużycie ani baterii (jeśli były załączone). Gwarancja traci ważność po roku od daty zakupu. Po upływie tego czasu, wszelkie usługi serwisowe są płatne. Więcej informacji na temat serwisu technicznego, zarówno w ramach gwarancji, jak i usług odpłatnych, można uzyskać pod adresem techmed@techmed.pl. Naprawa lub wymiana produktu dokonana w ramach niniejszej gwarancji nie podlega żadnej formie rekompensaty. Zabrania się korzystania z produktu w miejscach publicznych. Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek pośrednie lub bezpośrednie uszkodzenia osób, mienia bądź zwierząt domowych spowodowane nieprzestrzeganiem zasad zawartych w instrukcji obsługi, zwłaszcza ostrzeżeń związanych z instalacją, eksploatacją i konserwacją urządzenia. Polityka firmy **TECH - MED** zakłada nieustanne udoskonalanie oferowanych przez nią produktów, dlatego firma **TECH - MED** zastrzega sobie prawo do modyfikowania swoich produktów, częściowo lub w całości, bez uprzedzenia i zgodnie z wymogami produkcyjnymi, z wyłączeniem jakiegokolwiek odpowiedzialności firmy **TECH - MED** oraz jej dystrybutorów.



Model

.....

Nr seryjny

.....

Data sprzedaży

.....

Pieczętka punktu sprzedaży

.....

Opis usterki

.....

.....

.....

.....

Model

.....

Nr seryjny

.....

Data sprzedaży

.....

Pieczętka punktu sprzedaży

.....

Opis usterki

.....

.....

.....

.....

rok zał. 1949

TECH - MED®

TECHNIKA MEDYCZNA

B. WÓJCIK s-ka jawna

00-801 Warszawa, ul. Chmielna 98

SKLEP FIRMOWY: tel.: (22) 654 64 93

BIURO HANDLOWE: tel.: (22) 654 64 92

faks: (22) 620 77 42

SERWIS: tel.: (22) 853 30 10

www.techmed.pl

techmed@techmed.pl

Przed użyciem aparatu prosimy przeczytać instrukcję.

Życzymy Państwu dużo zdrowia