

rok zał. 1949

**TECH - MED**®

TECHNIKA MEDYCZNA

ISO 9001 ISO 13485 CE

*Już 60 lat  
pomagamy zdrowo żyć*



**INSTRUKCJA OBSŁUGI  
ELEKTRONICZNYCH WAG SZKLANYCH:  
TM-EB9322, TM-EB9313**

## OSOBISTA WAGA ELEKTRONICZNA

Waga ta precyzyjnie mierzy ciężar ciała. Prawidłowo użytkowana, powinna służyć przez wiele lat.

### INFORMACJE TECHNICZNE

- Precyzyjny system czujników nacisku
- Maksymalne obciążenie (wagi TM-EB9322 oraz TM-EB9313-200 kg)
- Dokładność - 100 g
- Wystarczy dotknąć, by włączyć
- Automatyczne zerowanie
- Automatyczne wyłączenie
- Wskaźnik przeciążenia
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Masa wagi 2,19 kg
- Rozmiar wyświetlacza: TM-EB9322 - 80x40mm, TM-EB9313 - 90x55mm

### ZASILANIE


1. 1 bateria litowa CR2032 (dołączona w zestawie). Przed uruchomieniem wagi należy usunąć warstwę izolacyjną ze styków baterii.

Baterię należy wymienić, kiedy na wyświetlaczu pojawi się symbol LO.

### OBSŁUGA

**KROK 1.** Umieścić wagę na twardej, płaskiej powierzchni (unikając dywanów i innych miękkich powierzchni)

**KROK 2.** Włączyć wagę lekko naciskając platformę. Odczekać kilka sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się:

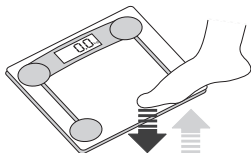

(Uwaga: Na wyświetlaczu pojawi się napis "Err", jeśli staniesz na wadze przed jej wyzerowaniem. W takim wypadku należy powrócić do kroku 2.)

Err

**KROK 3.** Delikatnie wejść na wagę. Rozłożyć stopy równomiernie i poczekać, aż urządzenie zmierzy ciężar ciała, który zostanie podany na wyświetlaczu:



63.1

#### **AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE**

Waga automatycznie wyłączy się po zejściu z niej. (Jeśli po włączeniu i wyzerowaniu się wagi nie zostanie ona użyta, wyłączy się automatycznie po ok. 6 sekundach.)

#### **WSKAŹNIK PRZECIĄŻENIA**

Przeciążenie wagi (umieszczenie na niej ponad 200kg w przypadku wag: TM-EB9322 i TM-EB9313) spowoduje wyświetlenie następującego komunikatu:

Err

#### **WSKAŹNIK NISKIEGO POZIOMU BATERII**

Kiedy waga wymaga wymiany baterii, na wyświetlaczu pojawia się komunikat:

LO

Należy w takim wypadku otworzyć tylny panel wagi, ostrożnie wyjąć baterię odciągając ją w bok w stosunku do styków; nie należy zginać styków, gdyż może to spowodować ich uszkodzenie.

Starej baterii należy pozbyć się w odpowiedni sposób.

## **WYMIANA BATERII LITOWEJ**

1. Wyjmowanie starej baterii: odciągać delikatnie zatrzask znajdujący się z boku gniazda baterii i wyjmij baterię.
2. Umieszczanie nowej baterii: umieść brzeg baterii pod elektrodą, po czym dociśnij ją z drugiej strony – tam, gdzie znajduje się zatrzask.

**UWAGA:** Zbyt silne pociągnięcie za blaszkę elektrody może spowodować jej złamanie lub wygięcie.

## **PORADY DOTYCZĄCE OBSŁUGI I KONSERWACJI**

- Mokre szkło jest śliskie. Waga powinna być sucha!
- Urządzenie przystosowane jest jedynie do nacisków statycznych. Uderzenie lub upuszczenie wagi może spowodować jej uszkodzenie.
- Z wagą należy obchodzić się ostrożnie. Jest to precyzyjny instrument pomiarowy. Nie należy jej upuszczać ani wskakiwać na nią.
- Do czyszczenia wagi używać należy wilgotnej szmatki; woda nie powinna jednak dostać się do środka. Nie należy używać chemicznych środków czyszczących. Należy unikać zamoczenia miejsca spojenia szkła z metalem .
- Wagę należy przechowywać w chłodnym miejscu i suchym powietrzu. Należy unikać miejsc gorących lub wilgotnych.
- Waga powinna znajdować się w pozycji poziomej. Nie należy stawiać jej na boku.
- Jeśli waga nie daje się włączyć, należy sprawdzić, czy podłączono baterię lub czy nie jest ona wyczerpana. W razie potrzeby należy podłączyć nową baterię.

- W przypadku pojawienia się błędu na wyświetlaczu lub gdy urządzenie nie daje się wyłączyć, należy wyjąć baterię na ok. 3 sek. i włożyć ją ponownie, usuwając w ten sposób błąd oprogramowania. Jeśli nie przyniesie to rezultatu, prosimy skontaktować się ze sprzedawcą.

Waga przeznaczona jest wyłącznie do pomiarów ciężaru ludzkiego ciała. Nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

### **Pozbycie się Zużytego Sprzętu (Stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich mających własne systemy zbiórki)**



Taki symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego

i elektronicznego, w celu recyklingu. Poprzez upewnienie się, że dyspozycja dotycząca produktu jest poprawna, zapobiega się potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzkie, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego postępowania. Recykling materiałów pomoże w ochronie naturalnych źródeł. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z naszym biurem w Warszawie lub ze służbami oczyszczania miasta.

---

00-801 Warszawa, ul. Chmielna 98; tel. serwis (+48 22) 853 30 10

---

## KARTA GWARANCYJNA WAG

### TM-EB9322, TM-EB9313

1. **TECH - MED**® udziela gwarancji na prawidłową pracę wagi na okres 24 miesięcy od daty jej nabycia.
2. Wady lub usterki ujawnione w okresie trwania gwarancji usuwamy bezpłatnie w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. W szczególnych przypadkach termin może zostać wydłużony.
3. Nabywcy przysługuje prawo wymiany urządzenia w przypadku, gdy nastąpi trzykrotne uszkodzenie tego samego elementu lub zespołu. W przypadku wymiany, okres gwarancji dla nowego przyrządu liczy się od daty jego wymiany.
4. Gwarancją nie są objęte i powodują jej unieważnienie, uszkodzenia wagi powstałe w wyniku: niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji, samowolnego dokonywania napraw; oraz wszelkie uszkodzenia mechaniczne i powstałe wskutek wycieku z zużytych baterii, które nie podlegają gwarancji.
5. Karta gwarancyjna opatrzona pieczęcią **TECH - MED**® i punktu sprzedaży oraz datą sprzedaży i podpisem sprzedawcy, we wszystkich miejscach do tego celu przeznaczonych, stanowi podstawę do realizacji uprawnień gwarancyjnych.

**Pieczęć punktu sprzedaży, data, podpis:**

rok zał. 1949

**TECH - MED**



**TECHNIKA MEDYCZNA**

*B. WÓJCIK s-ka jawna*

02-735 Warszawa,  
ul. Studencka 49  
tel. (22) 853-30-10  
e-mail: [techmed@techmed.pl](mailto:techmed@techmed.pl)  
[www.techmed.pl](http://www.techmed.pl)

**SKLEP FIRMOWY**

00-801 Warszawa, ul. Chmielna 98  
tel. (22) 654-64-92, faks (22) 620-77-42